



Návod k použití pro zubní lékaře/techniky

Použití: pro výrobu voskových konstrukcí na dentální implantáty s plastovou estetickou částí, pomocí CAD/CAM systému

1. Hlavní

Vosk může být zpracováván různými CAD/CAM systémy

2. Skladování

Chraňte před vlhkostí a přímým slunečním světlem

3. Oblast aplikování

Vosk není navržen pro aplikaci v ústech. Material může být použit pro přípravu dentálních korunek a můstků. Díky schopnosti bezezbytkové spalitelnosti je ideální pro metodu ztraceného vosku a následného odlévání kovu nebo presování keramických materiálů

4. Zpracování

Vyfrézované objekty vyjměte z bloku za pomoci příslušných fréz, nebo řezacích disků

5. Připojení lící soustavy

Výběr a připojení vhodné lící soustavy je závislé na používaných přístrojích a materiálech

6. Ukládání do kroužku

Kroužek vyložte keramickou páskou. Vakuově rozmíchejte příslušnou zatmelovací hmotu. Dodržujte správné poměry a kompletní návod poskytnutý výrobcem zatmelovací tekutiny i lícího kovu.

7. Likvidace

Nekontaminované zbytky mohou být znovu použity při voskových modelacích. Jelikož je tento materiál nerozpustný ve vodě, může být likvidován společně s běžným odpadem